

新型コロナウイルスが存在するかを判定

# COVID19 ANTIGEN RAPID TEST DEVICE 抗原検査ペン

研究用 日本製  
検査 1 回分 MADE IN JAPAN



一体型  
お口に入れれば  
約15分で検出  
結果がわかります

精度  
99.4%  
以上

変異株  
対応

※NS01Y・L452Rの変異株の検出確認済み

## 検査待ちなし!! その場で確認!! 最新の「ペン型オールインワン抗原検査キット」



### 検査方法はとっても簡単!



① 口の中をコレクターで拭い、しっかり唾液をしみこませてください。約2分間程度が目安です。

② 幾何学模様様が抽出バッファに入るまで強く押し込んでください。

③ 色つきのラインが表示されるまで約15分間待ちます。

本検査キットを使用して陽性の方は、  
無料でPCR検査を受けられます



QRコード  
<https://toa-pcr.com/LP/>



電話で予約  
0120-910-951  
(年中無休・24時間対応)

### 製品概要

- 製品名: 新型コロナウイルス抗原検査ペン型デバイス
- キット内容: \*試験紙付き唾液コレクター ×1  
\*抽出バッファ ×1  
\*乾燥剤 ×1  
\*使用説明書 ×1
- 本体サイズ: 約 H150×W21×D21 mm
- 判定時間: 約15分
- 保管温度: 室温 (2~30℃)
- 検出精度: 精度99.4%以上  
※メーカーPCR検査との比較実験 (陽性50検体・陰性50検体) では、陽性陰性一致率100%。実験の方法・結果は医師の確認・証明を受けています。あくまで実験結果であり、臨床的有用性は確認できておりません。診断等に用いないでください。)
- 使用期限: 製造より2年

安心の日本製!  
一体構造で、検体飛沫リスク極少

【使用目的】本品は研究用試薬です。この製品で得られた結果の臨床的有用性については確立されていないため、診断 (感染しているかどうかの判断) 等の目的では使用しないでください。新型コロナウイルス抗原検査ペン型デバイス (以後、本品) はイムノクロマト法による抗原検出試薬です。検体に含まれるSARS-CoV-2のヌクレシオカプシド蛋白質抗原の定性検出の判別を行います。この検査の結果は診断等の判断の材料に用いることはできません。本品で反応がある場合は、かかりつけ医又は地域のルールに従い、発熱相談窓口等にご相談ください。なお、本品で反応がなかったとしても、SARS-CoV-2感染を否定するものではありません。

【ご注意】 ●飲食・歯磨き・うがい直後の唾液採取は避けてください。 ●開封後はすぐにご使用ください。 ●緩衝液が皮膚に付着した場合はよく洗い流してください。 ●使用後のテストペンは引き抜かず廃棄して下さい。 ●本品を分解しないでください。

税込 **1,848円**

※20個以上からご注文をお願いします。

 **SUN-TAKACHIHO CO., LTD.**  
株式会社サン高千穂

〒003-0027 札幌市白石区本通16丁目北1-20  
TEL (011) 865-2344(代) FAX (011) 865-4450  
<http://www.sun-takachiho.co.jp>

